

Kurzanleitung: Richtiges Blutzuckermessen mit dem STADA GLUCO RESULT TO GO® PLUS

Türkisch



Kan şekeri testi

STADA GLUCO RESULT TO GO® PLUS – Basit adımlar



1

Ellerinizi ılık sabunlu su ile yıkayın.



2

Kutudan bir test çubuğu çıkarın ve kutuyu hemen tekrar kapatın. Test çubuğunu test yuvasına, temas noktaları (metal bloklar) yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Ölçüm cihazı açılır.



3

Parmak ucunu delin.



4

Bir kan damlasının oluşmasını bekleyin. Ardından, ölçüm cihazının içine yerleştirilmiş test çubuğunun ucunu, ekranda çizgiler belirinceye kadar kan damlasına dokundurun.



5

4 saniye içinde ölçüm sonucu ekranda görüntülenir. Test çubuğunu uygun bir çöp kutusuna atın.





Bu kılavuz, kan şekeri ölçümü için kısa bir genel bakış sunmaktadır. Ölçüm cihazının kurulumu ve tarih ve saat ayarlarıyla ilgili talimatlar kullanma kılavuzunun „İlk Adımlar“ bölümünde verilmiştir. Kan şekeri ölçüm yöntemiyle ilgili ayrıntılı bilgilerin tamamı için lütfen kullanma kılavuzunun „Kan şekeri testi“ bölümüne bakın.

Not: Delme yardımı sadece kendi kendine test için ve sadece bir hasta için öngörülmüştür. Sağlık uzmanları veya hemşirelerin kullanımı için uygun değildir.

STADA
Diagnostik  **D I A B E T E S**