

Kurzanleitung: Richtiges Blutzuckermessen mit dem STADA GLUCO RESULT TO GO® PLUS

Russisch



Тест на уровень сахара в крови STADA GLUCO RESULT TO GO® PLUS – Последовательность действий



1

Промойте руки тёплой водой с мылом.



2

Выньте одну тест-полоску из контейнера и сразу закройте контейнер. Введите тест-полоску в тестовое отверстие так, чтобы контакты (металлические блоки) указывали вверх. Глюкометр включается.



3

Уколите кончик пальца.



4

Дождитесь появления капли крови. Прижимайте кончик введённой в прибор тест-полоски к капле крови, пока на дисплее не появятся штрихи.



5

В течение 4 секунд отображается результат измерения. Выбросьте тест-полоску в соответствующий контейнер.





Данная инструкция содержит краткий обзор порядка измерения уровня глюкозы в крови. Указания по настройке глюкометра и установке даты и времени приведены в разделе „Первые шаги“ руководства пользователя. Подробную информацию о полной последовательности измерения уровня глюкозы в крови см. раздел „Тест на уровень сахара в крови“ в руководстве пользователя.

Примечание: ланцет предназначен для самотестирования и только для использования у одного пациента. Не предназначен для использования медицинским и обслуживающим персоналом.

STADA
Diagnostik  **D I A B E T E S**