

# Kurzanleitung: Richtiges Blutzuckermessen mit dem STADA GLUCO RESULT TO GO®PLUS

Arabisch



## اختبار لتحديد سكر الدم جهاز STADA Gluco Result إلى Go<sup>®</sup>PLUS – خطوات بسيطة



١

قم بوخز طرف الإصبع.



٢

أخرج شريط اختبار من العلبة وأعد غلقها مرة أخرى على الفور. استمر في إدخال شريط الاختبار في فتحة الاختبار، إلى أن تشير الملامسات (الأجزاء المعدنية) إلى أعلى. يعمل جهاز القياس.



٣

اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون.



٤

سيتم في خلال ٤ ثوان عرض نتيجة القياس. تخلص من شريط الاختبار بإلقائه في حاوية مناسبة.



٥

انتظر إلى أن يتم تكوين قطرة دم. قم بعد ذلك بتثبيت طرف شريط الاختبار المدخل في جهاز القياس على نقطة الدم، إلى أن تظهر شرطات على الشاشة.





هذا الدليل الإرشادي من شأنه أن يقدم لك نظرة عامة حول عملية قياس جلوكوز الدم. "يمكنك معرفة التعليمات الخاصة بتجهيز جهاز القياس وضبط التاريخ والوقت من خلال الاطلاع على فقرة "الخطوات الأولى". "للحصول على معلومات وافية عن عملية قياس جلوكوز الدم بالكامل فيرجى الاطلاع على فقرة "اختبار سكر الدم".

ملحوظة: وسيلة المساعدة على الوخز مخصصة لإجراء الاختبار الذاتي ولمريض واحد فقط. غير مناسب لاستخدام العاملين في القطاع الطبي أو مقدمي خدمات الرعاية.



STADA  
Diagnostik  DIABETES