

Kurzanleitung: Richtiges Blutzuckermessen mit dem STADA GLUCO RESULT®

Türkisch



Kan şekeri testi

STADA GLUCO RESULT® – Basit adımlar



1

Ellerinizi ılık sabunlu su ile yıkayın.



2

Kutudan bir test çubuğu çıkarın ve kutuyu hemen tekrar kapatın. Test çubuğunu test yuvasına, temas noktaları (metal bloklar) yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Ölçüm cihazı açılır.



3

Parmak ucunu delin.



4

Bir kan damlasının oluşmasını bekleyin. Ardından, ölçüm cihazının içine yerleştirilmiş test çubuğunun ucunu, cihaz bipleyinceye ve ekranda çizgiler belirinceye kadar kan damlasına dokundurun.



5

Birkaç saniye sonra ölçüm sonucu, tarih ve saatiyle birlikte ekranda görüntülenir.



6

Ölçüm cihazını test çubuğu aşağıya bakacak şekilde dik tutun. Test çubuğunu çıkarmak için ölçüm cihazındaki çıkarma tuşuna basın.



Bu kılavuz, kan şekeri ölçümü için kısa bir genel bakış sunmaktadır. Ölçüm cihazının kurulumu ve tarih ve saat ayarlarıyla ilgili talimatlar kullanma kılavuzunun „İlk Adımlar“ bölümünde verilmiştir. Kan şekeri ölçüm yöntemiyle ilgili ayrıntılı bilgilerin tamamı için lütfen kullanma kılavuzuna bakın. Kan şekeri ölçüm cihazınızın kullanımıyla ilgili yardıma ihtiyacınız olursa bizi 06181/603-9000 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

STADA
Diagnostik  **D I A B E T E S**