

Kurzanleitung: Richtiges Blutzuckermessen mit dem STADA GLUCO RESULT®

Arabisch



اختبار لتحديد سكر الدم جهاز STADA Gluco Result® – خطوات بسيطة



٣

قم بوخز طرف الإصبع.



٢

أخرج شريط اختبار من العلبة وأعد غلقها مرة أخرى على الفور.
استمر في إدخال شريط الاختبار في فتحة الاختبار، إلى أن تشير
الملامسات (الأجزاء المعدنية) إلى أعلى. يعمل جهاز القياس.



١

اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون.



٦

قم بتثبيت جهاز القياس في وضع رأسي، بحيث يشير
شريط الاختبار إلى أسفل.
اضغط على زر الإخراج في جهاز القياس للتخلص
من شريط الاختبار.



٥

بعد مرور ثوان قليلة سوف يتم عرض نتيجة القياس مع التاريخ
والوقت.



٤

انتظر إلى أن يتم تكوين قطرة دم. «قم بعد ذلك بتثبيت طرف
شريط الاختبار المدخل في جهاز القياس على نقطة الدم،
إلى أن يصدر الجهاز صوت صفارة وتظهر شرطات
على الشاشة.»

هذا الدليل الإرشادي من شأنه أن يقدم لك نظرة عامة حول عملية قياس جلوكوز الدم. "يمكنك معرفة التعليمات الخاصة بتجهيز جهاز القياس وضبط التاريخ والوقت من خلال الاطلاع على فقرة "الخطوات الأولى". "للحصول على معلومات وافية عن عملية قياس جلوكوز الدم بالكامل فيرجى الاطلاع على فقرة "اختبار سكر الدم". "إذا احتجت إلى مساعدة عند استخدام جهاز قياس سكر الدم، فيرجى الاتصال بنا على الرقم ٠٦١٨١/٦٠٣-٩٠٠٠.



STADA
Diagnostik  DIABETES