

Menopause

Selbsttest



Zum Nachweis einer erhöhten FSH-Konzentration im Urin

Kurzanleitung in 6 einfachen Schritten

Vor der Testdurchführung Gebrauchsanweisung bitte genau durchlesen



Schritt 1 • Urinprobe sammeln



- Morgenurin mit beiliegendem Urinbecher auffangen
- Morgenurin enthält hohe Konzentrationen von FSH
- wenn gewünscht, Einweghandschuhe verwenden

Schritt 2 • Folienbeutel öffnen




- Folienbeutel öffnen
- Testkassette und Pipette entnehmen

Schritt 3 • Urin aufnehmen




- mit Pipette Urin aufnehmen

Schritt 4 • Testkassette befüllen

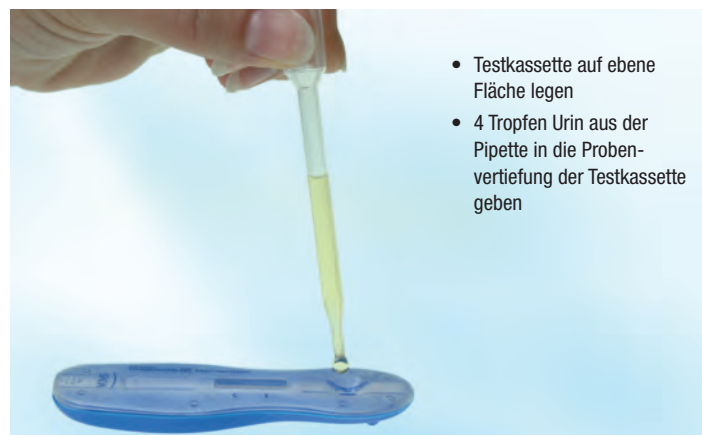

- Testkassette auf ebene Fläche legen
- 4 Tropfen Urin aus der Pipette in die Probenvertiefung der Testkassette geben

Schritt 5 • Testergebnis ablesen

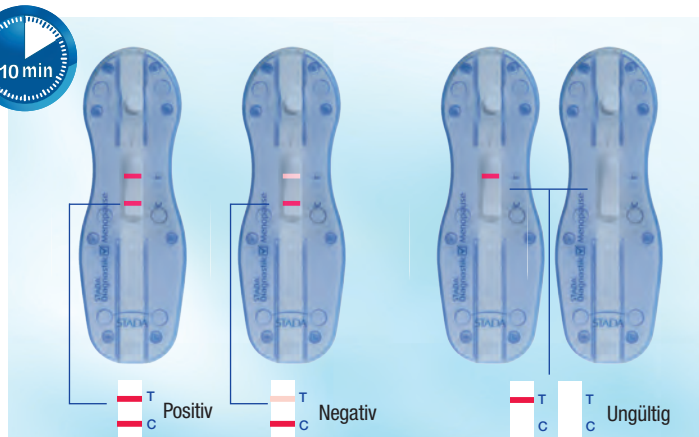

  T C **Positiv**

  T C **Negativ**

  T C **Ungültig**

Schritt 6 • Test wiederholen

- **Ergebnis positiv:**
Führen Sie nach fünf bis sieben Tagen einen zweiten Test durch. Wenn das Ergebnis des zweiten Tests erneut positiv ist, sollten Sie mit Ihrem Gynäkologen sprechen, um die Diagnose Ihrer Menopause zu bestätigen.
- **Ergebnis negativ:**
Wir empfehlen, dass Sie den Test 40 bis 60 Tage später noch einmal durchführen oder mit Ihrem Gynäkologen sprechen.